

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST - AŽURIRANJE



Datum slanja pisma

GE HealthCare Ref. br. 34136-TRM

Za: Administrator zdravstvene skrbi / upravitelj rizika
Šef sestrištva
Rukovoditelj odjela biomedicinskog inženjerstva

Predmet: **Ažuriranje obavijesti tvrtke GE HealthCare u vezi s anesteziološkim uređajima Aisys CS², Avance CS², Avance CS² Pro, Aisys, Avance, Amingo, Aespire 100, Aespire View, Aespire 7900 i Aespire 7100 opremljenim zajedničkim pomoćnim izlazom za plin (ACGO)**

Poštovani kupci,

Nastavno na priloženu hitnu sigurnosnu obavijest tvrtke GE HealthCare (Ref. br. 34136), šaljem vam tehničke referentne priručnike (Technical Reference Manuals, TRM) koji uključuju zahtjeve u vezi sa zamjenom poklopaca za ACGO priključak i ACGO prekidač.

Pri provođenju bilo kakvih postupaka planiranog održavanja anestezioloških sustava GE HealthCare, primijenite kontrolni popis za planirano održavanje i upute navedene u Tehničkim referentnim priručnicima. Da biste pristupili Tehničkim referentnim priručnicima za anesteziološke sustav tvrtke GE HealthCare, slijedite upute u nastavku za preuzimanje najnovijih verzija TRM-ova. Ako imate poteškoća s pristupom dokumentaciji ili biste željeli imati tiskanu verziju priručnika, za pomoć se obratite tvrtki GE HealthCare.

Upute:

1. Otvorite portal za korisničku dokumentaciju GE HealthCare Customer Documentation Portal putem poveznice ili QR koda prikazanog u nastavku.
GE HealthCare Documentation Portal (Portal za korisničku dokumentaciju tvrtke GE HealthCare):
<https://www.gehealthcare.com/support/manuals>



2. Odgovarajući broj TRM dokumenta naveden je u tablici u nastavku.

Brojevi dokumenata prema proizvodima:

Proizvod	Tehnički referentni priručnik (TRM)
Aespire 7100/Aespire 100	M1110140
Aespire 7900	1009-0541-000
Aespire View	M1170027
Aisys	M1046983
Aisys CS ²	2069137-001
Amingo	1009-0357-000
Avance	1009-0357-000
Avance CS ² /CS ² Pro	M1222131

3. Unesite broj TRM dokumenta u traku za pretraživanje na portalu s korisničkom dokumentacijom i kliknite gumb za pretraživanje.
4. Kliknite gumb za preuzimanje da biste pokrenuli preuzimanje dokumenta i prihvatili informacije o autorskim pravima.

Ako još niste popunili i vratili obrazac za potvrdu koji je priložen hitnoj obavijesti tvrtke GE HealthCare, popunite ga i vratite ga na FMI34136.ACGO@gehealthcare.com.

Ispričavamo se zbog bilo kakvih neugodnosti koje je ova akcija mogla prouzročiti i zahvaljujemo vam na vašoj stalnoj suradnji i podršci.

Srdačan pozdrav,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Laila Gurney', followed by a long horizontal flourish.

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare