

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST AŽURIRANJE



Datum slanja pisma

GE HealthCare Ref. br. 85480-2B

Za: Direktora/voditelja odjela za radiologiju
Direktora/voditelja odjela za kardiologiju
Upravitelja rizika / administratora bolnice
Voditelja odjela za radiologiju
Voditelja odjela za kardiologiju
PACS administratora
Direktora IT odjela
Voditelja odjela za biomedicinsko inženjerstvo
Voditelja odjela za slikovnu informatiku

Predmet: **Ažuriranje prethodnog pisma o hitnom ispravku medicinskog uređaja (priloženo) u vezi s proizvodnom linijom Centricity Radiology RA600 (RA600) i Centricity Cardiology CA1000 (CA1000).**

Poštovani kupci,

Nastavno na priloženu Obavijest o sigurnosna tvrtke GE HealthCare, ref br. 85480-2, šaljemo vam dopunu priručnika za instalaciju u kojem su navedene upute za promjenu lozinki.

Da biste ublažili potencijalni problem, postoje dva koraka:

1. korak: Slijedite dolje navedene upute da biste preuzeli dopunu priručnika za instalaciju.

1. Pristupite portalu GE HealthCare Customer Documentation Portal (Portal s korisničkom dokumentacijom tvrtke GE) na:
<https://www.gehealthcare.com/support/manuals>
2. U polje za pretraživanje Enter Product Info (Unos podataka o proizvodu) unesite kataloški broj:
5981182
3. Pritisnite Enter ili kliknite na ikonu s povećalom u polju za pretraživanje da biste pokrenuli pretragu. Kao rezultat pretraživanja prikazat će se: Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum (Dopuna priručnika za instalaciju uređaja Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology Ca1000)-<zadani jezik>.
 - (a) Prijevodi su dostupni putem padajućeg izbornika za odabir jezika, koji se nalazi na desno od polja za pretraživanje.
4. Kliknite na gumb Download (Preuzmi) ↓ koji se nalazi na desnoj strani od stavke Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum (Dopuna priručnika za instalaciju uređaja Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology Ca1000)-<jezik>.
5. Kliknite Accept (Prihvati) da biste potvrdili ograničenja autorskih prava. Sada će se prikazati: Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum (Dopuna priručnika za instalaciju uređaja Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology Ca1000)-<jezik>.
6. Kliknite na ikonu za spremanje ili preuzimanje, ovisno o pretraživaču.

7. Spremite Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum (Dopuna priručnika za instalaciju uređaja Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology Ca1000)-<jezik> na lokalni sustav, kao i na odgovarajuću središnju lokaciju dostupnu svim korisnicima.

2. korak: Slijedite upute u dopuni da biste promijenili lozinke.

Popunite i vratite priloženi dokument Potvrda o obavijesti o sigurnosna.

Podaci za kontakt Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s ovom obavijesti, obratite se servisnoj službi tvrtke GE HealthCare ili lokalnom servisnom predstavniku.

Budite uvjereni da je održavanje visoke razine sigurnosti i kvalitete naš najveći prioritet. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se putem gore navedenih podataka za kontakt.

Srdačan pozdrav,



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare



Scott Kelley
Chief Medical Safety Officer
GE HealthCare

**POTVRDA OBAVIJESTI O SIGURNOSNA
POTREBAN JE ODGOVOR – OBRAZAC O PROVEDENIM RADNJAMA**

Popunite ovaj obrazac i vratite ga tvrtki GE HealthCare odmah nakon primitka, u roku od 30 dana od primitka, ili popunite internetski obrazac za odgovor dostupan putem poveznice na dnu stranice. Time ćete potvrditi primitak i razumijevanje Obavijesti o sigurnosna.

Naziv ustanove: _____

Adresa: _____
Grad/Županija/Poštanski broj/Država: _____

Adresa e-pošte kupca: _____

Broj telefona kupca: _____

Potpisivanjem ovog obrasca potvrđujemo primitak i razumijevanje popratne Obavijesti o sigurnosna, te da smo preuzeli i slijedili upute u dopuni za promjenu lozinki u skladu s tom Obavijesti.

Navedite ime odgovorne osobe koja je ispunila ovaj obrazac.

Potpis: _____

Ime tiskanim slovima: _____
Funkcija / naziv radnog mjesta: _____

Datum (DD/MM/GGGG): _____

Skenirajte ili fotografirajte ispunjeni obrazac te ga pošaljite e-poštom na adresu Recall.85480_2@gehealthcare.com ili pošaljite internetski obrazac za odgovor.



QR kod za e-poštu



QR kod za internetski obrazac za odgovor